

Руководство по установке программно-методического обеспечения NMR Processor

ВНИМАНИЕ!

Дистрибутив программного обеспечения поставляется Заказчику, как правило, на физическом носителе (Flash-накопитель), или, например, в случае проведения обновления, передаётся по сети Интернет.

Поскольку защита NMR Processor обеспечивается с использованием физических ключей, такой ключ передаётся Заказчику одновременно с дистрибутивом (Рис. 1). При работе ПО «NMR Processor» ключ должен быть вставлен в любой свободный USB-порт компьютера или ноутбука.



Рисунок 1. Пример используемого USB-ключа

Перед началом установки рекомендуется закрыть все работающие приложения. ПО «NMR Processor» устанавливается с помощью программы - установщика. Во избежание возникновения проблем в процессе установки, рекомендуется производить её под учетной записью с правами администратора. Также рекомендуется в процессе установки отключить антивирусное ПО, поскольку оно часто блокирует установочные файлы драйверов физического ключа.

Запустить файл «NPSSetup.exe». Далее следовать указаниям мастера установки (см. рис. 2 - 10).

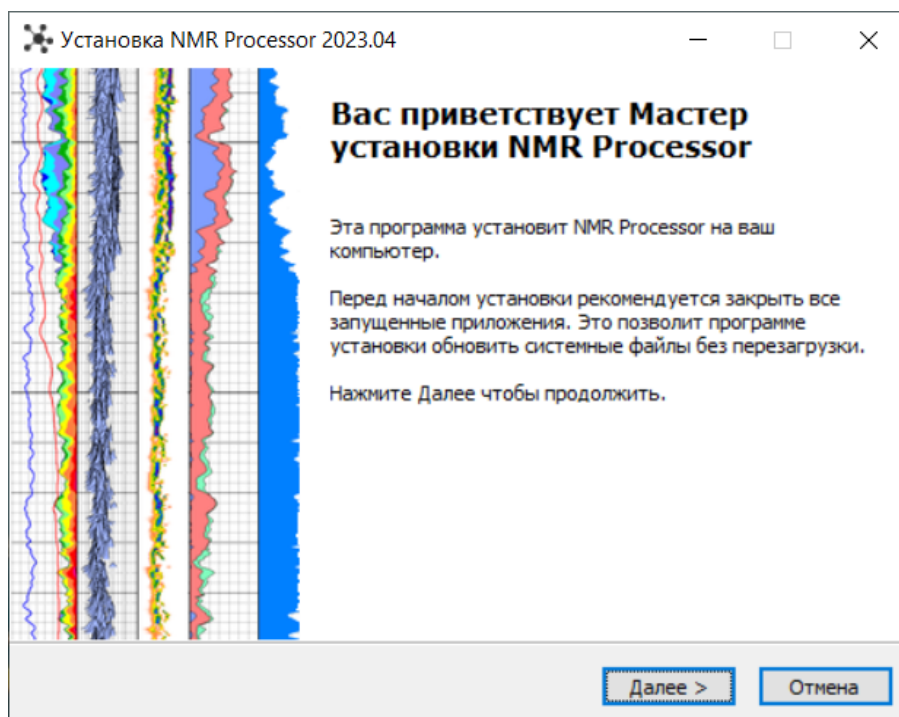


Рисунок 2. Начало работы мастера установки

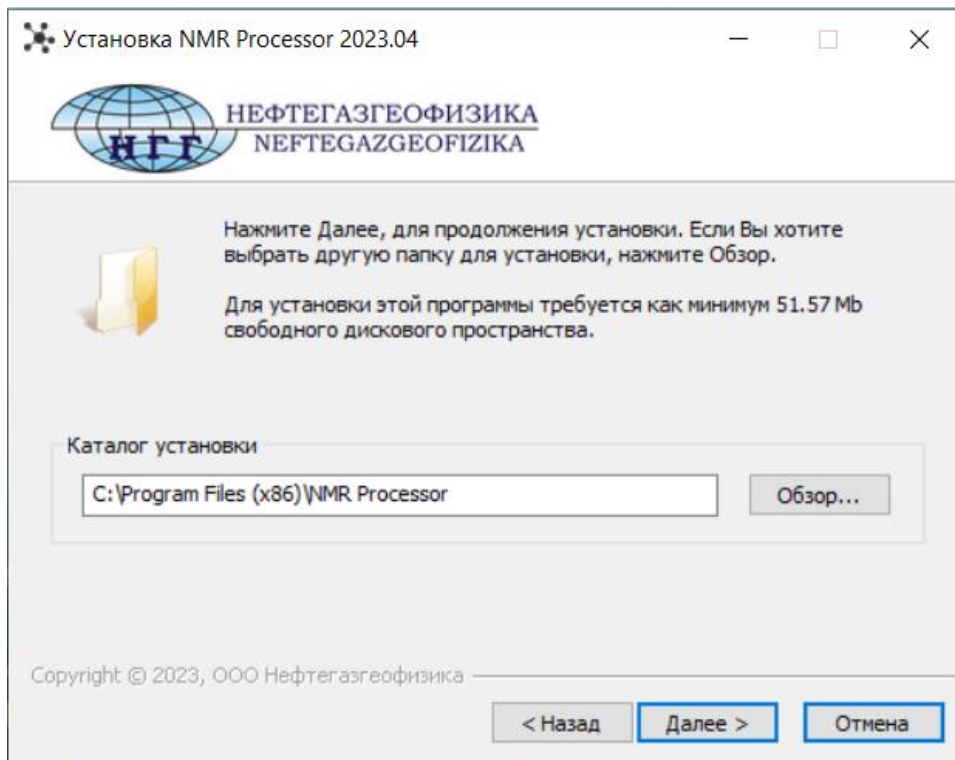


Рисунок 3. Выбор каталога

В процессе установки (Рис. 3), пользователь может выбрать каталог для установки программ. Каталог будет создан автоматически.

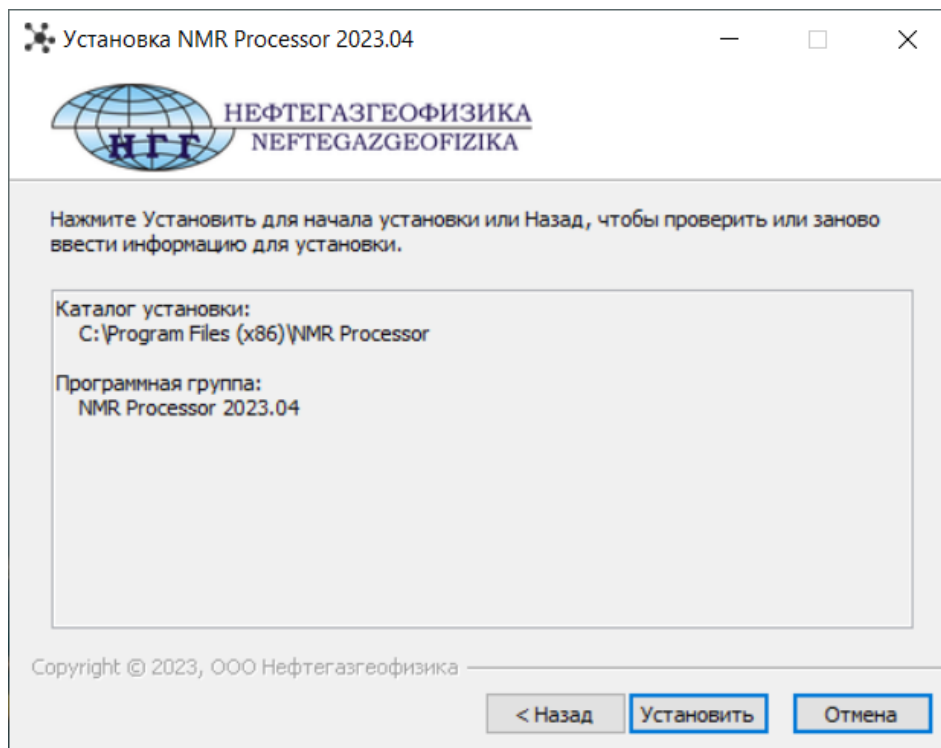


Рисунок 4. Подтверждение параметров для установки ПО

В окне (Рис. 4) необходимо подтвердить установку.

Если на компьютере, по указанному пути, уже установлена версия ПО «NMR Processor», то при нажатии кнопки «Установить» все существующие файлы будут перезаписаны.

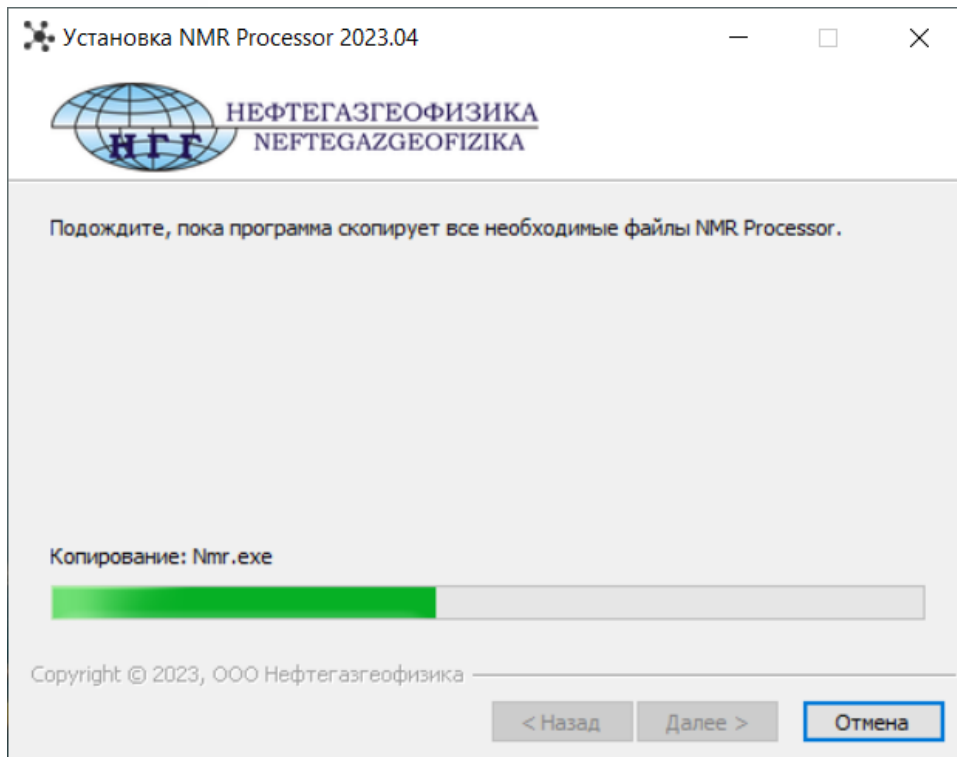


Рисунок 5. Копирование файлов

Запуск установки (Рис. 5).

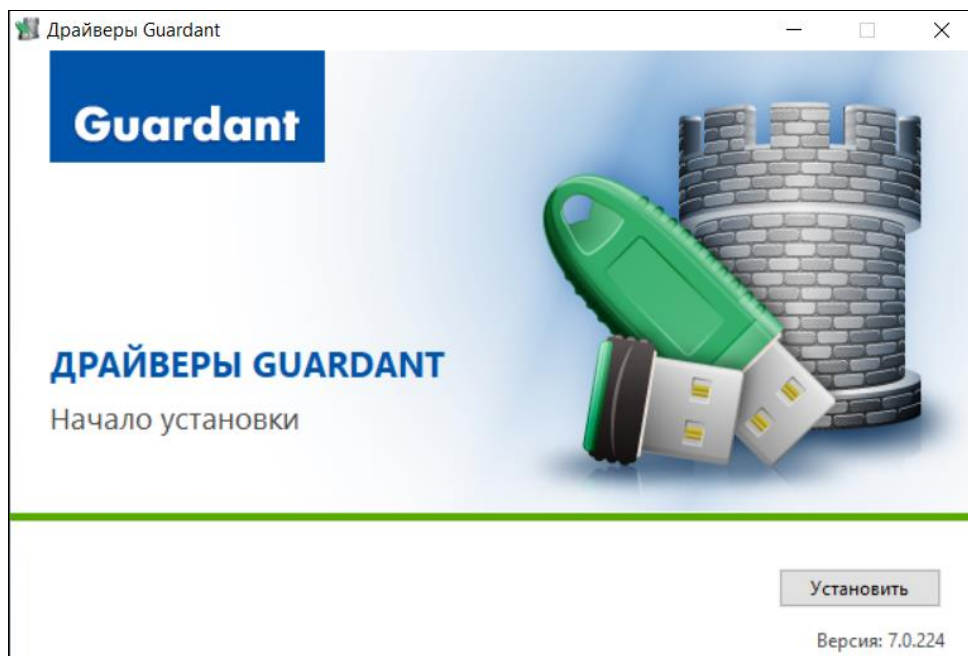


Рисунок 6. Установка драйвера USB-ключа

Для работы ПО необходима установка драйверов физического ключа. Процесс установки драйверов автоматически запускается после завершения копирования основных файлов. Необходимо нажать на кнопку «**Установить**», если драйвера на компьютере не были установлены.

Если драйвера на компьютере уже установлены, на месте кнопки «**Установить**» будет находиться кнопка «**Удалить**». В этом случае данное окно нужно просто закрыть и подтвердить отмену установки (удаления) драйверов.

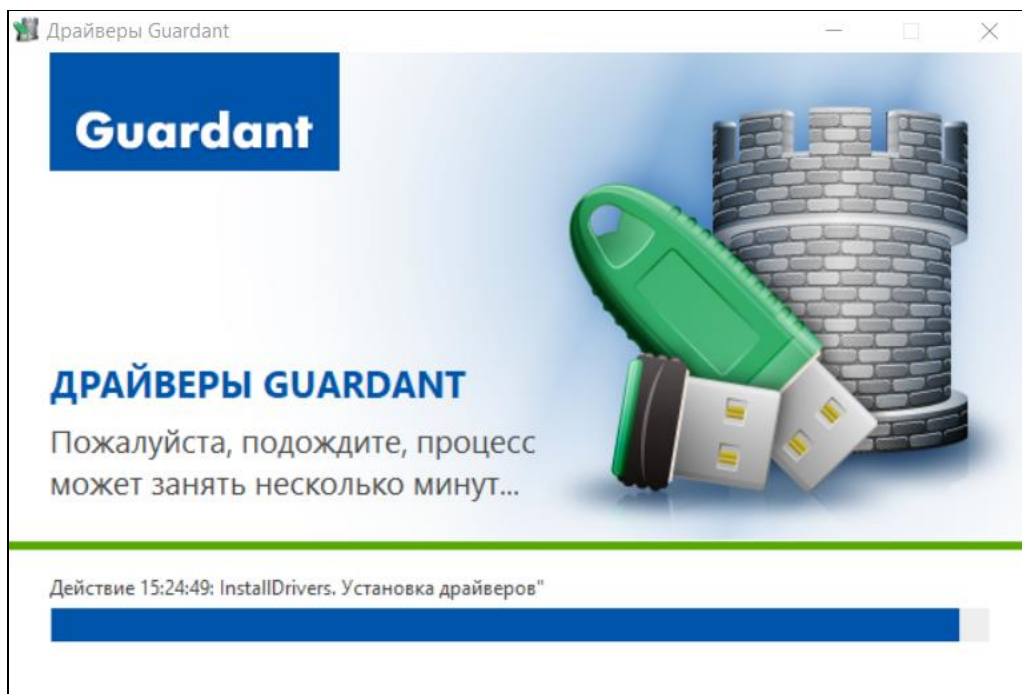


Рисунок 7. Процесс установки драйвера

Процесс установки драйверов будет запущен (Рис. 7).

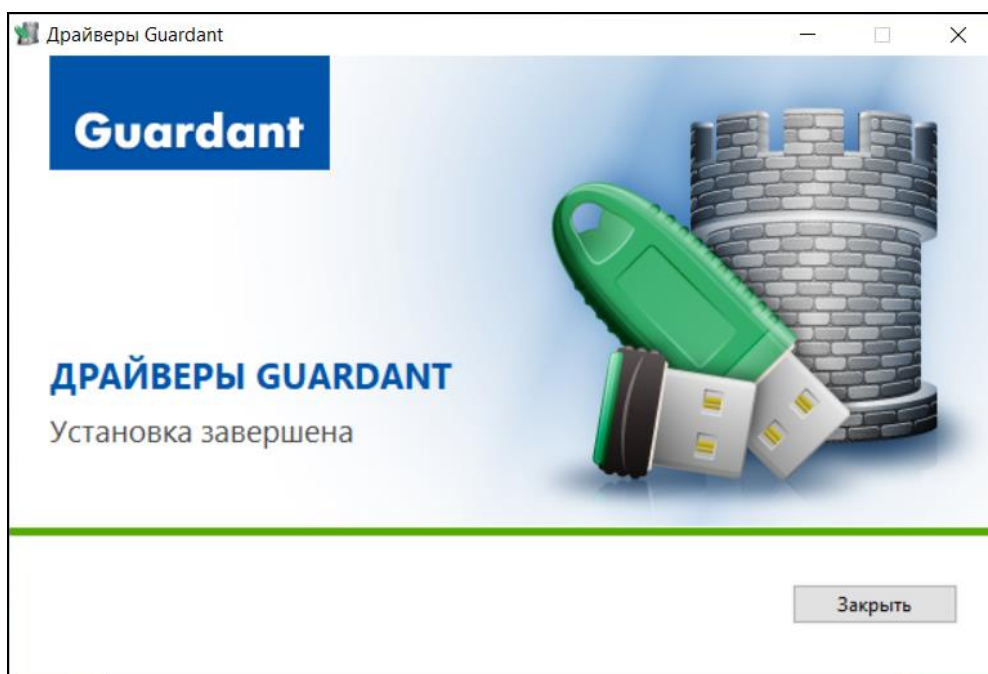


Рисунок 8. Установка драйвера завершена.

Для завершения процесса установки драйверов физического ключа (Рис. 8), необходимо нажать кнопку «Закреть».

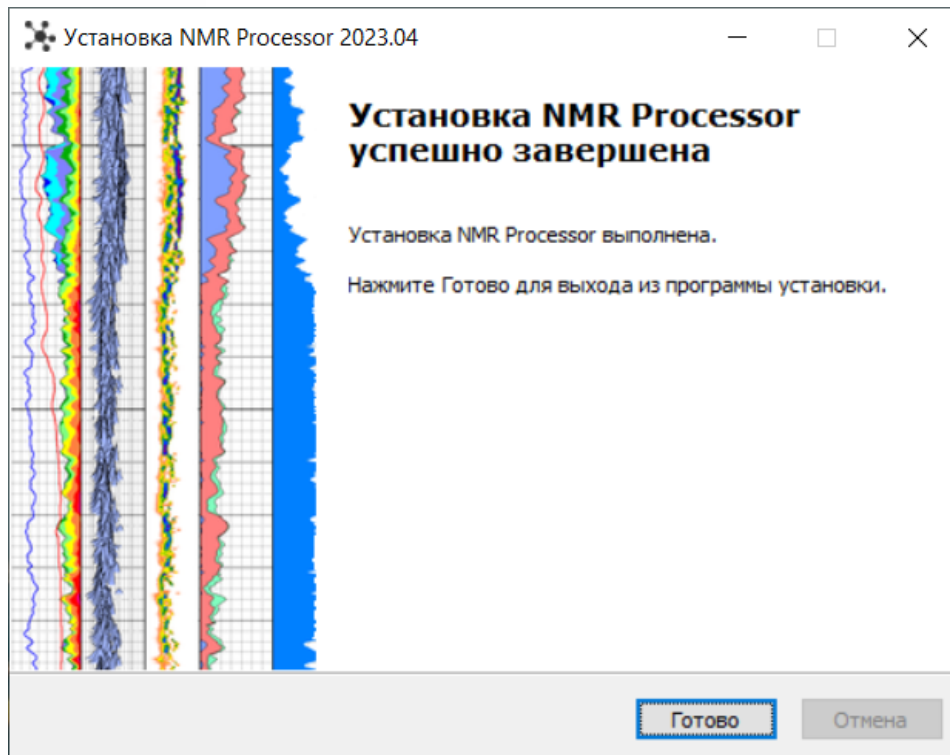


Рисунок 9. Завершение мастера установки

По завершении процесса установки драйверов физического ключа, выводится сообщение о завершении работы мастера установки (Рис. 9).

После нажатия кнопки «Готово», в меню «ПУСК» появится программная группа ярлыков для запуска основных модулей запуска программно-методического обеспечения «**NMR Processor**» (Рис. 10).

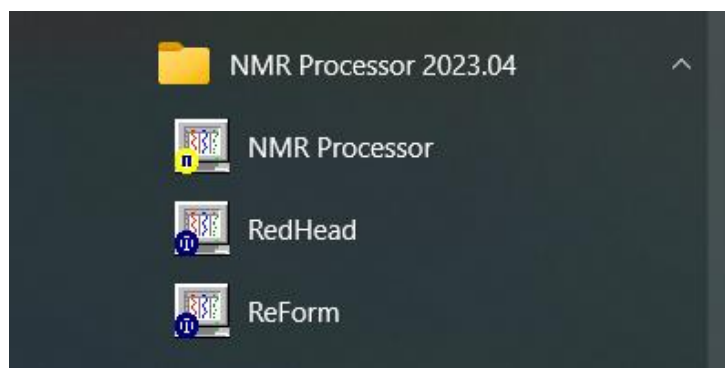


Рисунок 10. Ярлыки основных модулей запуска ПО

Для ознакомления с функционалом программного обеспечения рекомендуется изучить Руководство пользователя, которое поставляется вместе с ПО «**NMR Processor**».

Для удаления ПО «**NMR Processor**» необходимо воспользоваться поставляемым в комплекте средством удаления (Uninstall.exe).

ВНИМАНИЕ! При работе с геофизическими данными пользователь должен самостоятельно заботиться об их сохранности путём создания резервных копий. В случае повреждения файлов с данными или их утраты при работе в ПО «**NMR Processor**», а также в результате удаления программного обеспечения с компьютера, поставщик ПО ответственности не несёт.